

## 1. Programmer la Linkor

### - Paramétrages

Allumer l'appareil en appuyant sur l'interrupteur à l'arrière : 5 fenêtres vont apparaître successivement :

Sélectionner la **langue**, **unité**, **région**, **heure**..... **page 10 du Manuel Utilisateur**


Se connecter **au compte** : **ID** : immunec - **Mot de passe** : linkor (en minuscules)

Se connecter à internet  : **WI-FI** ou **câble Ethernet**..... **page 11 du Manuel Utilisateur**


Une mise à jour automatique va démarrer au bout de quelques minutes : « **Accepter** ».

Une fois la mise à jour terminée, l'appareil redémarre. La Linkor est maintenant prête à l'emploi.

Pour accéder aux paramètres cliquer sur l'icône 

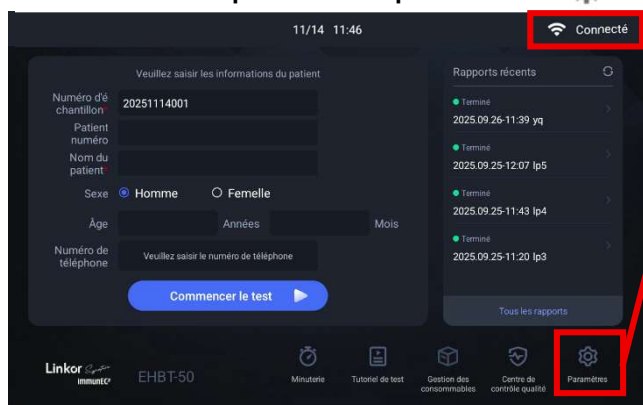

Faire défiler l'écran tactile pour accéder à tous les paramètres.

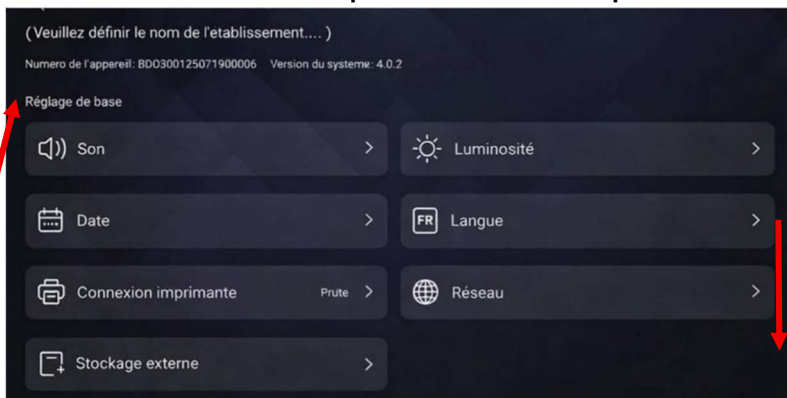

## 2. Imprimer les rapports de test

### - Sur papier thermique (inclus)..... **page 10 du Manuel Utilisateur**

Installation du papier d'impression :

Ouvrir le boîtier de l'imprimante thermique situé sur le côté droit de la Linkor.


**Tirer le couvercle vers le haut.**

Placer simplement le rouleau de papier d'impression dans le bac papier.

**Veiller à ce que la partie déroulante du papier d'impression soit tourné vers le bas.**

Laisser dépasser légèrement le papier d'impression du bac et refermer le couvercle.

Sélectionner le rapport de tests souhaité et cliquer sur le bouton en haut à droite imprimer.

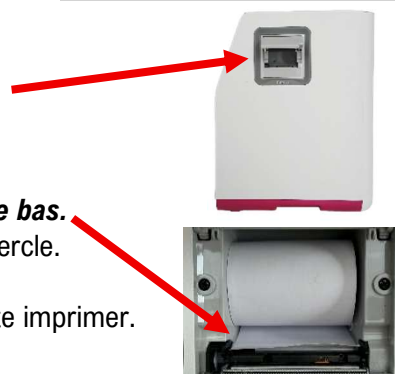

### - Sur papier A4..... **page 10 du Manuel Utilisateur**

Dans le **Menu [Paramètres]** cliquer sur « **Connexion d'impression** »

Cliquer sur le bouton « **Connecter l'imprimante** » pour accéder à la page **[Connexion imprimantes]**.

Le **[Périphérique d'impression]** désigne l'imprimante qui peut être détectée via WI-FI ou sur votre réseau local.

### 3. Exporter les rapports de test en PDF




- **Vers USB** : Brancher une clé USB à l'arrière de la machine (port USB)..... **page 14 du Manuel Utilisateur**  
Sélectionner le rapport de tests souhaité et cliquer sur le bouton en haut à droite exporter.

Il est préférable de laisser une clé USB branchée à l'arrière de la machine (port USB) pour faciliter la récupération des données

- **Vers Smartphone ou Ordinateur PC**, téléphone, Linkor sont impérativement connectés sur le même réseau.

Cliquer [Paramètres]   Adresse consultation rapports  L'adresse IP de la Linkor s'affiche. (Exemple : http :192.168.1.104 :8000)

Saisir cette adresse IP dans le **navigateur de votre téléphone ou PC**.  **ENTREE**

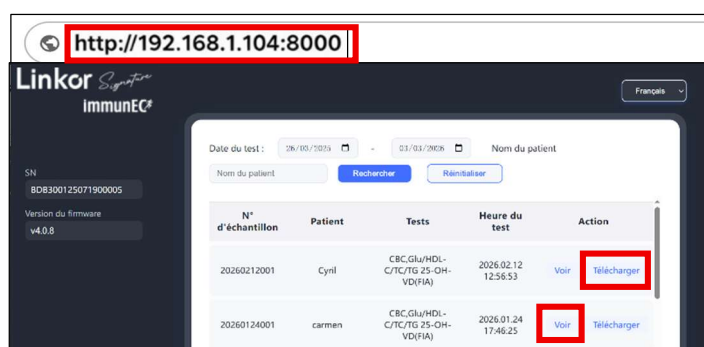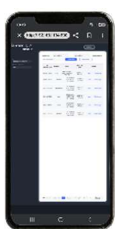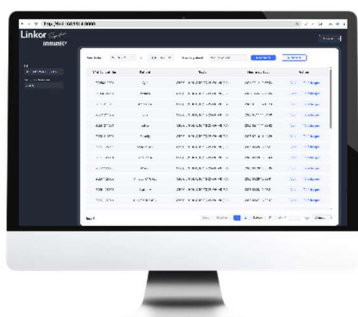

Page Web d'accès aux rapports de tests

### 4. Kits de réactifs


Chaque boîte de réactif contient une carte NFC avec des informations sur le lot et courbe d'étalonnage.

Avant d'utiliser un nouveau kit de réactifs, enregistrer le numéro de lot de chacun des 3 réactifs.

**Voir vidéo** : Description des Réactifs (site [immunec.com](http://immunec.com) : onglet : Support)

 Penser à vous équiper de : **cotons-tiges, pansements et lingettes alcoolisées.**

**NB** : Avant de charger les réactifs dans le chariot veuillez retirer le ruban adhésif du récolteur du rail hématologique.

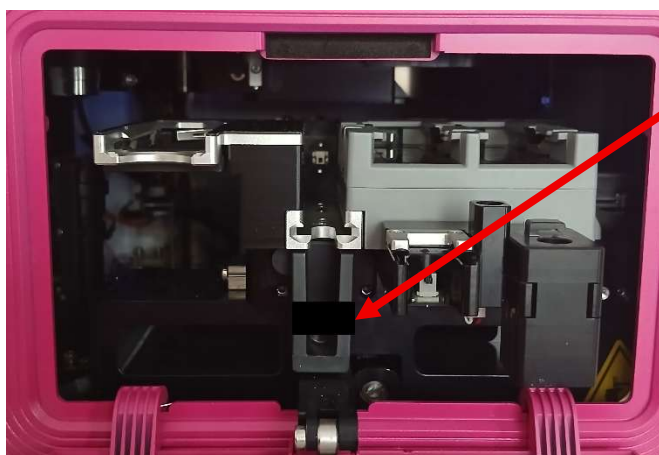

Ce **ruban adhésif** assure le **maintien et la stabilité** du récolteur hématologique uniquement durant le transport.

### 6. Dépannage

cf. **page 22 du Manuel Utilisateur**

Télécharger le **formulaire de demande d'assistance** depuis le site [immunec.com](http://immunec.com) : onglet **Garantie** du menu.

 **Garantie** ▾