

## 1. Programare Linkor

### - Setări

Porniți dispozitivul apăsând comutatorul din spate: vor apărea succesiv 5 ferestre:

Selecționați **limba**, **unitatea de măsură**, **regiunea**, ora..... **pagina 10 din Manualul de utilizare**


Conectați-vă la cont: **ID: immunec** - **Parolă: linkor** (cu litere mici)

Conectați-vă la internet:  **Wi-Fi** sau **cablu Ethernet**..... **pagina 11 din Manualul de utilizare**


După câteva minute va începe o actualizare automată: „**Accept**”.

Odată ce actualizarea este finalizată, dispozitivul se va reporni. Linkor este acum gata de utilizare.

Pentru a accesa setările, faceți clic pe pictogramă 

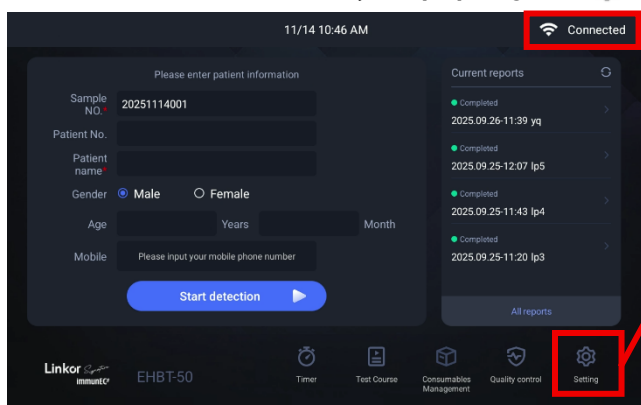

Derulați pe ecranul tactil pentru a accesa toate setările

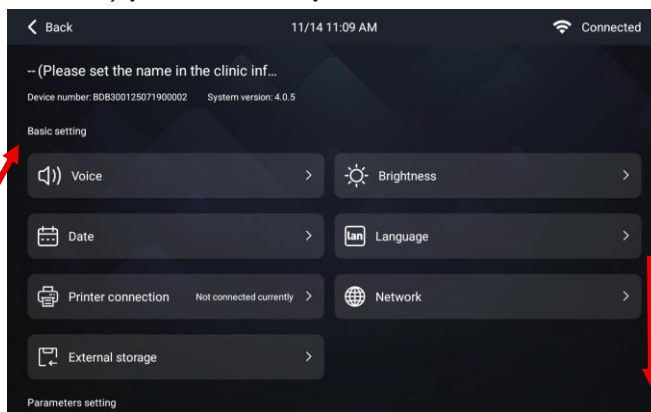

## 2. Imprimați rapoarte de testare

- **Pe hârtie termică (inclusă)**..... **pagina 10 din Manualul de utilizare**

Instalarea hârtiei de imprimare:

Deschideți carcasa imprimantei termice situată în partea dreaptă a aparatului Linkor.

**Ridicați capacul.** Pur și simplu așezați rola de hârtie de imprimare în tava de hârtie.

**Asigurați-vă că partea de jos a hârtiei de imprimare este orientată în jos.**

Lăsați hârtia de imprimare să iasă ușor din tavă și închideți capacul.

Selecționați raportul de testare dorit și faceți clic pe butonul de imprimare din colțul din dreapta sus.



- **Pe hârtie A4**..... **pagina 10 din Manualul de utilizare**

În meniul [Setări], faceți clic pe „**Conectare imprimantă**”

Faceți clic pe butonul „**Conectare imprimantă**” pentru a accesa **pagina [Conectare imprimantă]**.

[**Dispozitiv de imprimare**] înseamnă imprimanta care poate fi detectată prin Wi-Fi sau în rețeaua locală.



### 3. Exportați rapoartele de testare în format PDF

- **Pe USB:** Conectați un stick USB în partea din spate a aparatului (port USB)..... **pagina 14 din Manualul de utilizare**  
Selectați raportul de testare dorit și faceți clic pe butonul de export din colțul din dreapta sus.

**Se recomandă menținerea unui dispozitiv USB în portul din spate pentru a facilita recuperarea datelor**

- **Pe smartphone sau PC,** telefonul și Linkor trebuie să fie neapărat conectate la aceeași rețea.

Faceți clic pe [⚙️] ➡️ **Report Viewing Address** ➡️ Se afișează **adresa IP** a Linkor. (Ex: http:192.168.1.104:8000)  
Introduceți această adresă IP în **browserul telefonului sau al PC-ului.** **INTRODUCERE**

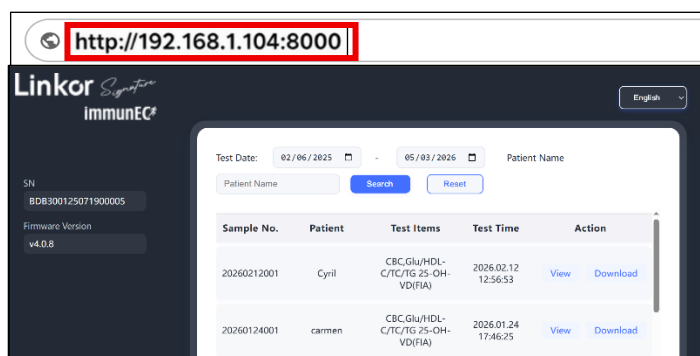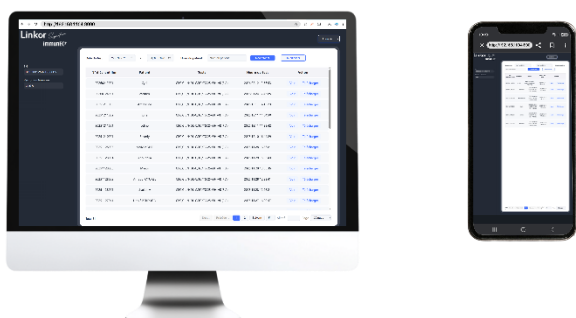

Pagina web de acces la raportul de testare

### 4. Kituri de reactivi


Fiecare cutie de reactivi conține un card NFC cu informații despre lot și curba de calibrare.

Înainte de a utiliza un nou kit de reactivi, notați numărul de lot al fiecăruia dintre cei 3 reactivi.

**Vedeți videoclipul:** Descrierea reactivilor (site-ul [immunec.com](http://immunec.com): fila: Asistență)

⚠️ Nu uitați să vă echipați cu: **tampoane de bumbac, bandaje și șervețele cu alcool.**

**NB:** Înainte de a încărca reactivii în cărucior, vă rugăm să îndepărtați banda de fixare de pe șina hematologică.

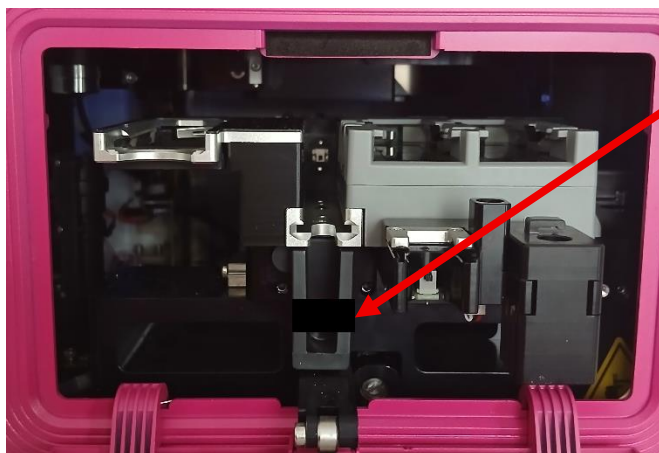

Această **bandă adezivă** asigură **menținerea și stabilitatea** colectorului hematologic numai în timpul

### 6. Depanare .....cf. **pagina 22 din Manualul de utilizare**

Descărcați **formularul de solicitare de asistență** de pe site-ul [immunec.com](http://immunec.com): fila „Garanție” din meniu.

**Garantie** ▼